

Utilisation prévue

Pour la collecte d'acides nucléiques à partir d'échantillons de salive.

Application

Ne pas manger, boire, fumer, se brosser les dents ou mâcher de la gomme au minimum 30 minutes avant utilisation. Vérifier que le niveau de liquide est à 2 ml avant ouverture. Si les solutions semblent troubles avant utilisation, réchauffez le tube entre les mains jusqu'à ce que la solution devienne claire.

- Retirez le capuchon du tube. Conservez le capuchon pour une utilisation ultérieure. Visser l'entonnoir de collecte sur le tube.
- Récoltez l'échantillon salivaire directement dans le tube à l'aide de l'entonnoir jusqu'à ce que le niveau de liquide dans le tube, atteigne 4 ml. La collecte prendra entre 2 et 5 minutes.
- Dévissez l'entonnoir de collecte et replacez fermement le capuchon du tube. Jeter l'entonnoir.
- Agiter plusieurs fois le tube de prélèvement pour mélanger la salive avec la solution.

Contenu

Entonnoir, tube pré-rempli de tampon de stabilisation, bouchon.



Précautions

Ne pas avaler. Si la solution stabilisante entre en contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau. Le capuchon du tube peut présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

FDS disponible sur www.isoHelix.com